

PANDA

MEDICAL

www.pandamedical.co

ELLISYS
plus

TERMOLIFTING
FRAKCYJNY

Z TERAPIĄ LED




Technologia

RADIOFREKWENCJA BIPOLARNA

Podczas zabiegu wprowadza się do skóry właściwej i tkanki podskórnej na pożądaną głębokość sterylne mikroigły, a następnie emitowane są impulsy o częstotliwości radiowej.

Kontrolowane termicznie uszkodzenie tkanek indukuje natychmiastowe obkurczenie włókien kolagenowych, co daje efekt liftingu i poprawy napięcia skóry. W wyniku procesu gojenia i regeneracji oraz oddziaływania energii dochodzi do pobudzenia neokolagenezy, zagęszczenia i ujędrnienia skóry oraz spektakularnej poprawy jakości i ogólnej kondycji skóry.

Nieznaczne uszkodzenie termiczne naskórka minimalizuje ryzyko hiperpigmentacji i innych skutków ubocznych.

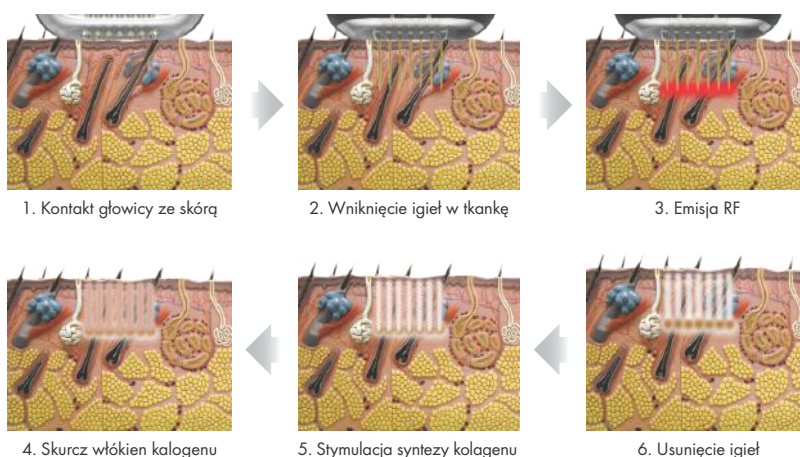


TERAPIA MIKROIGŁOWA

ELLISYS Plus wykorzystuje Igły izolowane z 25 tipami lub nieizolowane z 49 tipami, które wchodzi w skórę na głębokość od 0,5 do 3,5 mm (głębokość tę można regulować w krokach co 0,1 mm.) Dzięki systemowi izolacji igieł (silikon-złoto) fala radiowa deponowana jest na konkretnej głębokości nie grzejąc całego kanału wejścia igły co daje mniejszą bolesność i szybszy efekt gojenia.

PARAMETRY:

- Zmienny czas ekspozycji od 100 do 900 ms
- 10 poziomów intensywności pracy
- Możliwość interwału - ustawienia prędkości pracy: 0.3s, 0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s

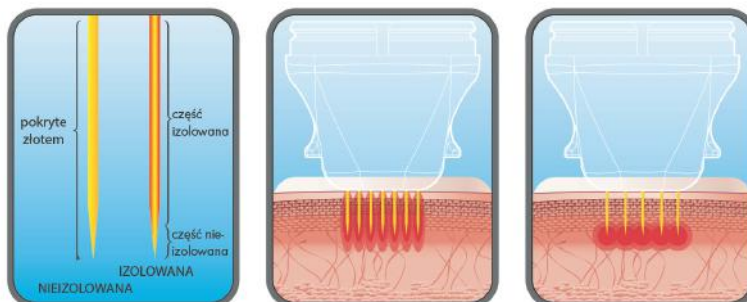

Typy igieł: nieizolowana i izolowana

EFEKTY ZABIEGU:

- poprawa zagęszczenia skóry twarzy w obrębie podbródka, żuchwy czy szyi
- redukcja chomików i drugiego podbródka - modelowanie konturów twarzy
- wygładzenie zmarszczek i drobnych linii na twarzy, szyi i dekolcie
- uniesienie powiek górnych
- ujędrnienie skóry na ciele - ramiona, kolana, uda, brzuch, pośladki
- redukcja i rozjaśnienie przebarwień
- wyrównanie i ujednolicenie koloru skóry
- spłycenie rozstępów i blizn
- redukcja blizn potrądzikowych
- zwężenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych
- redukcja nadpotliwości
- przygotowanie skóry pod inne zabiegi kosmetyczne/medyczne

WSKAZANIA

DO WYKONANIA ZABIEGU:

- wiotkość skóry
- zmarszczki
- opadające powieki
- plamy i przebarwienia
- rozstępy
- trądzik i blizny potrądzikowe
- rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
- nadpotliwość

ŚWIATŁO LED

Światło wspomaga leczenie różnych schorzeń. Jest absorbowane przez komórki, które regenerują się szybciej. Stan naskórka jak i skóry właściwej poprawia się pod wpływem światła w widoczny sposób, a wytwarzane delikatne ciepło nie powoduje przegrzewania tkanek.



Niebieskie (49pin)


Najczęściej stosowane w leczeniu trądziku - zmniejsza aktywność gruczołów łojowych, ma działanie antyseptyczne, bakteriobójcze, łagodzi stany zapalne.




Czerwone (25pin)

Redukuje zaczerwienienia jak i stany zapalne, zwiększa elastyczność skóry, aktywność i metabolizm komórek oraz działa przeciwzmarszczkowo.


Proces regeneracji skóry

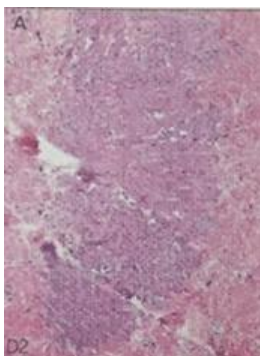


2 dni po zabiegu

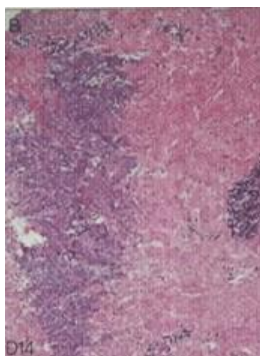

14 dni po zabiegu

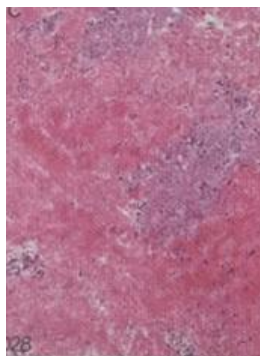

28 dni po zabiegu

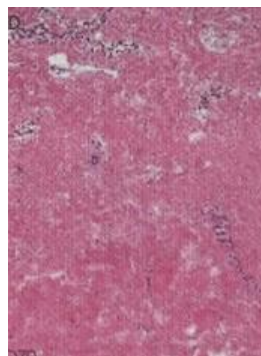

70 dni po zabiegu

Nieznaczny
naciek zapalny

Stopniowa
przebudowa
kalogenu

Widoczna większa ilość
młodych fibroblastów
neokogeneza


Kompletna
przebudowa
skóry

Wskazania zabiegowe

TWARZ, W TYM POWIEKI I OKOLICA UST
SZYJA
DEKOLD




RAMIONA
PIERSI
BRZUCH
STREFA INTYMNA
UDA

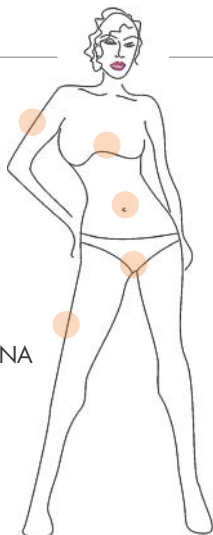

Dlaczego ELLISYS Plus

ELLISYS
plus

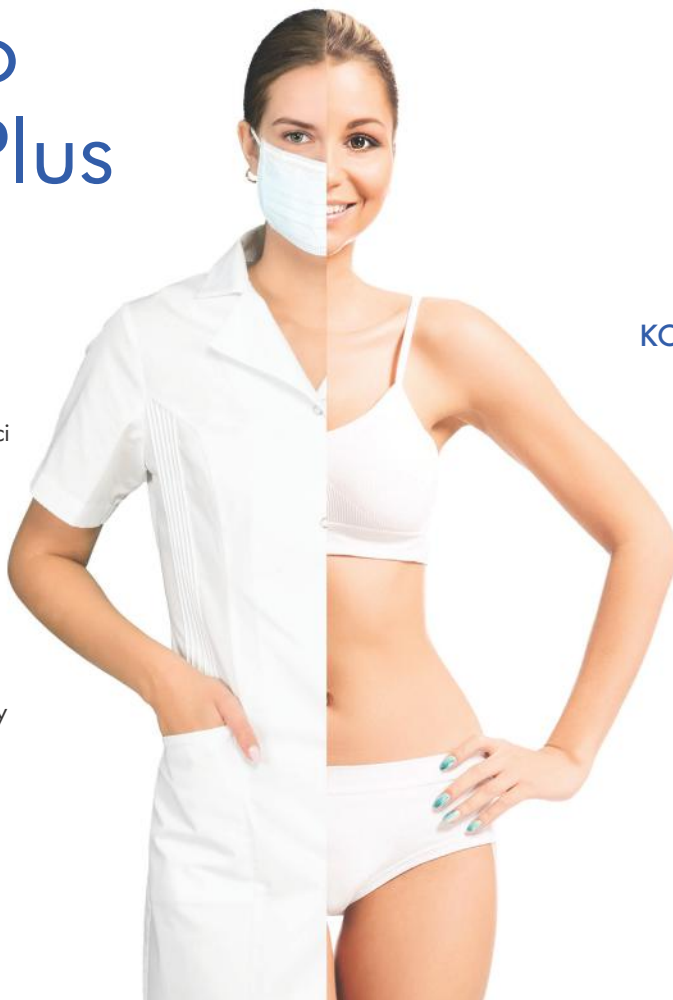

KORZYŚCI DLA LEKARZA

- + Pełna parametryzacja i indywidualny dobór intensywności terapii. Umożliwia całkowitą kontrolę mocy i czasu ekspozycji podczas zabiegu
- + Mikroigły, pokryte złotem, zapewniają gładką i kontrolowaną penetrację skóry
- + Czytelny wygodny interfejs, automatycznie ustawione protokoły zabiegowe
- + Kompaktowe, lekkie (3,5 kg) urządzenie przenośne w łatwej do transportu walizce

KORZYŚCI DLA PACJENTA

- + Skuteczność i efekt od pierwszego zastosowania
- + Możliwość zastosowania terapii w przypadku wszystkich fototypów skóry i o każdej porze roku
- + Ledoterapia stymuluje regenerację tkanek, gwarantując szybkie i spektakularne efekty, bez ryzyka poparzenia naskórka
- + Krótki okres rekonwalescencji (1-2 dni)

RADIOFREKWENCJA
BIPOLARNA

TERAPIA
MIKROIGŁOWA

ŚWIATŁO
LED



Efekty zabiegu ELLISYS Plus



Blizny potrądzikowe



Lifting szyi

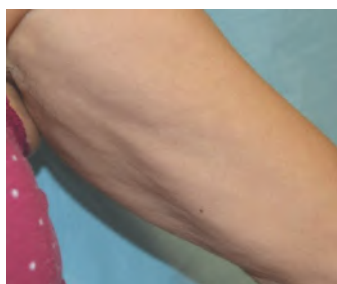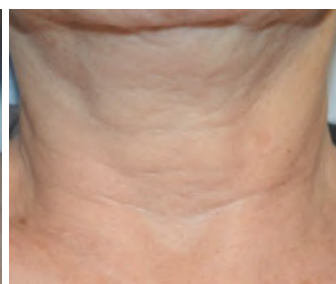

Lifting ciała - ramiona



Lifting szyi

